
















JOBST®

ウルトラシアー
オペーク
ベラバー
クラシック
soソフト
フォーメン アンビション
フォーメン
ベラ ライト
ベラ ストロング
ジョビパッド
バンデージ




ジョブスト® 製品ラインアップ総合カタログ

弾性ストッキング

ショート ストレッチ	 <p>オペーク1</p>	 <p>ベラバー2</p>	 <p>クラシック3</p>	
	 <p>フォーメン アンビション20</p>	 <p>ベラストロング</p>  <p>オペーク2</p>	 <p>オペーク3</p>	
ロング ストレッチ	 <p>soソフト20</p>	 <p>フォーメン30</p>  <p>フォーメン アンビション30</p>	 <p>フォーメン40</p>	
	 <p>ウルトラシアア20</p>	 <p>ベラライト</p>  <p>soソフト30</p>	 <p>フォーメン アンビション40</p>	
圧迫圧	15mmHg	~20mmHg~	~30mmHg~	~40mmHg~


ショートストレッチ
タイプ着用時

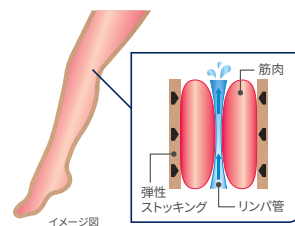

ショートストレッチタイプでは、高いポンプ機能を確保し、筋肉が動く時の血管やリンパ管にかかる圧力を高めるように、弾力性繊維と独自の編み方によって伸びにくい生地を採用しています。

※参考文献：平井正文 著(2013) データとケースレポートから見た圧迫療法の基礎と臨床 [第1版第1刷] 株式会社メディカルトリビューン P58

ロングストレッチ
タイプ着用時

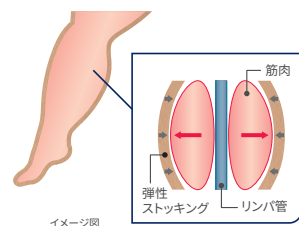

ロングストレッチタイプでは、筋肉の動きに合わせて生地が伸びるため、ポンプ機能は低くなりますが、よく伸びることにより、フィット感にすぐれ履きやすく動きやすいという特長があります。

※参考文献：平井正文 著(2013) データとケースレポートから見た圧迫療法の基礎と臨床 [第1版第1刷] 株式会社メディカルトリビューン P39

各種機能性包帯



ジョビパッド



「ジョブスト」はドイツの医療機器メーカー「BSN medical社」の弾性ストッキングのブランド名です。



JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。






弾性ストッキング ジョブストウルトラシア-20・30

20 20-27hPa (15-20mmHg) **30** 27-40hPa (20-30mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

履き心地と透明感に優れた「弾性ストッキング」

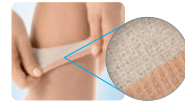

ハイソックス ソフトフィット
シリコンコーティングされた細い糸と弾性糸を編んだメッシュ生地を膝バンド部内側に採用



ストッキング センシティブグリッ
バンド部の皮膚トラブル低減を目指した仕様のシリコングリッ

ジョブストウルトラシア-20 品種表

タイプ	ハイソックス ショート	ハイソックス レギュラー		ハイソックス ソフトフィット	ストッキング シリコングリッ付ドット	ストッキング センシティブグリッ	パンティ ストッキング	マタニティ	
つま先タイプ	つま先あり	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先あり	つま先あり	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	
シルキー ベージュ	S	JP-U20KSS1	JP-U20KSS	JP-U21KSS	JP-U20KSSF	JP-U21TSS	JP-U20TSSV	JP-U20WSS	JP-U20MSS
	M	JP-U20KMS1	JP-U20KMS	JP-U21KMS	JP-U20KMSF	JP-U21TMS	JP-U20TMSV	JP-U20WMS	JP-U20MMS
	L	JP-U20KLS1	JP-U20KLS	JP-U21KLS	JP-U20KLSF	JP-U21TLS	JP-U20TLV	JP-U20WLS	JP-U20MLS
	XL	JP-U20KXS1	JP-U20KXS	JP-U21KXS	JP-U20KXSF	JP-U21TXS	JP-U20TXSV		
ブラック	S	JP-U20KSB1	JP-U20KSB	JP-U21KSB	JP-U20KSBF	JP-U21TSB	JP-U20TSBV	JP-U20WSB	
	M	JP-U20KMB1	JP-U20KMB	JP-U21KMB	JP-U20KMBF	JP-U21TMB	JP-U20TMBV	JP-U20WMB	
	L	JP-U20KLB1	JP-U20KLB	JP-U21KLB	JP-U20KLBF	JP-U21TLB	JP-U20TLBV	JP-U20WLB	
	XL	JP-U20KXB1	JP-U20KXB	JP-U21KXB	JP-U20KXBF	JP-U21TXB	JP-U20TXBV		
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥4,268 (¥3,880)	¥4,268 (¥3,880)	¥4,510 (¥4,100)	¥4,466 (¥4,060)	¥5,434 (¥4,940)	¥5,434 (¥4,940)	¥5,830 (¥5,300)	¥9,680 (¥8,800)
		1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足	1足

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブストウルトラシア- 医療機器届出番号:13B2X0016200003


ジョブストウルトラシア-30 品種表

タイプ	ハイソックス ショート	ハイソックス レギュラー		ハイソックス ソフトフィット	ストッキング シリコングリッ付ドット	ストッキング センシティブグリッ	パンティ ストッキング	マタニティ		
つま先タイプ	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先あり		
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード		
シルキー ベージュ	S	JP-U30KSS1	JP-U31KSS1	JP-U30KSS	JP-U31KSS	JP-U30KSSF	JP-U31TSS	JP-U30TSSV	JP-U30WSS	JP-U30MSS
	M	JP-U30KMS1	JP-U31KMS1	JP-U30KMS	JP-U31KMS	JP-U30KMSF	JP-U31TMS	JP-U30TMSV	JP-U30WMS	JP-U30MMS
	L	JP-U30KLS1	JP-U31KLS1	JP-U30KLS	JP-U31KLS	JP-U30KLSF	JP-U31TLS	JP-U30TLV	JP-U30WLS	JP-U30MLS
	XL	JP-U30KXS1	JP-U31KXS1	JP-U30KXS	JP-U31KXS	JP-U30KXSF	JP-U31TXS	JP-U30TXSV		
ブラック	S	JP-U30KSB1	JP-U31KSB1	JP-U30KSB	JP-U31KSB	JP-U30KSBF	JP-U31TSB	JP-U30TSBV		
	M	JP-U30KMB1	JP-U31KMB1	JP-U30KMB	JP-U31KMB	JP-U30KMBF	JP-U31TMB	JP-U30TMBV		
	L	JP-U30KLB1	JP-U31KLB1	JP-U30KLB	JP-U31KLB	JP-U30KLBF	JP-U31TLB	JP-U30TLBV		
	XL	JP-U30KXB1	JP-U31KXB1	JP-U30KXB	JP-U31KXB	JP-U30KXBF	JP-U31TXB	JP-U30TXBV		
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥5,940 (¥5,400)	¥5,940 (¥5,400)	¥5,940 (¥5,400)	¥6,710 (¥6,100)	¥6,710 (¥6,100)	¥7,095 (¥6,450)	¥10,340 (¥9,400)		
		1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足	1足		

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブストウルトラシア- 医療機器届出番号:13B2X0016200003

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)				サイズ記入欄
	S	M	L	XL	
ヒップ(H)	71-117	76-127	81-137	—	
大腿部(G)	40-62	46-70	54-78	60-81	
ふくらはぎ(C)	28-38	30-42	32-46	34-50	
足首(B)	18-21	21-25	25-29	29-33	

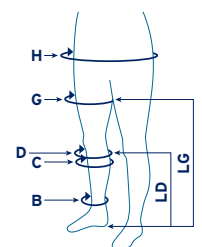

<適用肢長> ハイソックス 膝下の長さ(LD):レギュラータイプ>38cm、ショートタイプ≤38cm
ストッキング 大腿部(股下5cm)までの長さ(LG):>68.5cm



弾性ストッキング

ジョブスト オパーク1・2・3

1 24-28hPa(18-21mmHg)

3 45-61hPa(34-46mmHg)

2 31-43hPa(23-32mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求。

- ・ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用
- ・柔らかく、やや厚手の生地を採用

ジョブスト オパーク1 品種表

タイプ		ハイソックス		ストッキング シリコングリップ付ドット		パンティストッキング	
つま先タイプ		つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
ベージュ	SS	JP-Q10K1S	JP-Q11K1S	JP-Q10T1S	JP-Q11T1S	JP-Q10W1S	JP-Q11W1S
	S	JP-Q10K2S	JP-Q11K2S	JP-Q10T2S	JP-Q11T2S	JP-Q10W2S	JP-Q11W2S
	M	JP-Q10K3S	JP-Q11K3S	JP-Q10T3S	JP-Q11T3S	JP-Q10W3S	JP-Q11W3S
	L	JP-Q10K4S	JP-Q11K4S	JP-Q10T4S	JP-Q11T4S	JP-Q10W4S	JP-Q11W4S
	2L	JP-Q10K5S	JP-Q11K5S	JP-Q10T5S	JP-Q11T5S	JP-Q10W5S	JP-Q11W5S
	3L	JP-Q10K6S	JP-Q11K6S	JP-Q10T6S	JP-Q11T6S	JP-Q10W6S	JP-Q11W6S
ブラック	SS	JP-Q10K1B	JP-Q11K1B	JP-Q10T1B	JP-Q11T1B	JP-Q10W1B	JP-Q11W1B
	S	JP-Q10K2B	JP-Q11K2B	JP-Q10T2B	JP-Q11T2B	JP-Q10W2B	JP-Q11W2B
	M	JP-Q10K3B	JP-Q11K3B	JP-Q10T3B	JP-Q11T3B	JP-Q10W3B	JP-Q11W3B
	L	JP-Q10K4B	JP-Q11K4B	JP-Q10T4B	JP-Q11T4B	JP-Q10W4B	JP-Q11W4B
	2L	JP-Q10K5B	JP-Q11K5B	JP-Q10T5B	JP-Q11T5B	JP-Q10W5B	JP-Q11W5B
	3L	JP-Q10K6B	JP-Q11K6B	JP-Q10T6B	JP-Q11T6B	JP-Q10W6B	JP-Q11W6B
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥6,215 (¥5,650) 1足(2本)		¥13,200 (¥12,000) 1足(2本)		¥23,980 (¥21,800) 1足	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト オパーク 医療機器届出番号:13B1X10103000029

ジョブスト オパーク2 品種表

タイプ		ハイソックス		ストッキング シリコングリップ付ドット		パンティストッキング		片足ストッキング	
つま先タイプ		つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし	つま先なし	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
								左	右
ベージュ	SS	JP-Q20K1S	JP-Q21K1S	JP-Q20T1S	JP-Q21T1S	JP-Q20W1S	JP-Q21W1S	JP-Q21G1SL	JP-Q21G1SR
	S	JP-Q20K2S	JP-Q21K2S	JP-Q20T2S	JP-Q21T2S	JP-Q20W2S	JP-Q21W2S	JP-Q21G2SL	JP-Q21G2SR
	M	JP-Q20K3S	JP-Q21K3S	JP-Q20T3S	JP-Q21T3S	JP-Q20W3S	JP-Q21W3S	JP-Q21G3SL	JP-Q21G3SR
	L	JP-Q20K4S	JP-Q21K4S	JP-Q20T4S	JP-Q21T4S	JP-Q20W4S	JP-Q21W4S	JP-Q21G4SL	JP-Q21G4SR
	2L	JP-Q20K5S	JP-Q21K5S	JP-Q20T5S	JP-Q21T5S	JP-Q20W5S	JP-Q21W5S	JP-Q21G5SL	JP-Q21G5SR
	3L	JP-Q20K6S	JP-Q21K6S	JP-Q20T6S	JP-Q21T6S	JP-Q20W6S	JP-Q21W6S	JP-Q21G6SL	JP-Q21G6SR
ブラック	SS	JP-Q20K1B	JP-Q21K1B	JP-Q20T1B	JP-Q21T1B	JP-Q20W1B	JP-Q21W1B		
	S	JP-Q20K2B	JP-Q21K2B	JP-Q20T2B	JP-Q21T2B	JP-Q20W2B	JP-Q21W2B		
	M	JP-Q20K3B	JP-Q21K3B	JP-Q20T3B	JP-Q21T3B	JP-Q20W3B	JP-Q21W3B		
	L	JP-Q20K4B	JP-Q21K4B	JP-Q20T4B	JP-Q21T4B	JP-Q20W4B	JP-Q21W4B		
	2L	JP-Q20K5B	JP-Q21K5B	JP-Q20T5B	JP-Q21T5B	JP-Q20W5B	JP-Q21W5B		
	3L	JP-Q20K6B	JP-Q21K6B	JP-Q20T6B	JP-Q21T6B	JP-Q20W6B	JP-Q21W6B		
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥10,340 (¥9,400) 1足(2本)		¥14,520 (¥13,200) 1足(2本)		¥23,980 (¥21,800) 1足		¥12,430 (¥11,300) 1足	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト オパーク 医療機器届出番号:13B1X10103000029

ジョブスト オパーク3 品種表

タイプ		パンティストッキング			ストッキング シリコングリップ付		
つま先タイプ		つま先あり			つま先なし		
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	
ベージュ	SS	JP-Q30W1S	JP-Q31W1S	JP-Q31T1S			
	S	JP-Q30W2S	JP-Q31W2S	JP-Q31T2S			
	M	JP-Q30W3S	JP-Q31W3S	JP-Q31T3S			
	L	JP-Q30W4S	JP-Q31W4S	JP-Q31T4S			
	2L	JP-Q30W5S	JP-Q31W5S	JP-Q31T5S			
	3L	JP-Q30W6S	JP-Q31W6S	JP-Q31T6S			
ブラック	SS	JP-Q30W1B	JP-Q31W1B				
	S	JP-Q30W2B	JP-Q31W2B				
	M	JP-Q30W3B	JP-Q31W3B				
	L	JP-Q30W4B	JP-Q31W4B				
	2L	JP-Q30W5B	JP-Q31W5B				
	3L	JP-Q30W6B	JP-Q31W6B				
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥25,850 (¥23,500) 1足			¥15,510 (¥14,100) 1足(2本)		

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト オパーク 医療機器届出番号:13B1X1010300029

弾性ストッキング

ジョブスト クラシック3

3 45-61hPa(34-46mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

着用しやすさ、動きに追従し適切な圧迫を維持することを目的として伸縮性と回復性のよい糸を採用。

- ・通気性が良くムレにくい

ジョブスト クラシック3 品種表

タイプ		パンティストッキング		片足ストッキング	
つま先タイプ		つま先なし		つま先なし	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
				左	右
SS		JP-CL31W1S	JP-CL31G1SL	JP-CL31G1SR	
S		JP-CL31W2S	JP-CL31G2SL	JP-CL31G2SR	
M		JP-CL31W3S	JP-CL31G3SL	JP-CL31G3SR	
L		JP-CL31W4S	JP-CL31G4SL	JP-CL31G4SR	
2L		JP-CL31W5S	JP-CL31G5SL	JP-CL31G5SR	
3L		JP-CL31W6S	JP-CL31G6SL	JP-CL31G6SR	
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥27,720 (¥25,200) 1足		¥12,430 (¥11,300) 1足	


*片足ストッキングのベルトは左右ペアで装着可能な形状です。

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト クラシック 医療機器届出番号:13B1X10103000039

オパーク・クラシック採寸表

サイズ	適用周囲長						サイズ 記入欄
	SS	S	M	L	2L	3L	
大腿部シリコンバンド(G)	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
大腿部(G)	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
大腿中央部(F)	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
膝蓋骨(E)	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
腓骨頭(D)	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
ふくらはぎ(C)	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
ふくらはぎ下部(B1)	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
足首(B)	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
足関節(Y)	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
つま先(A)	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	

<適用肢長> ハイソックス 膝下の長さ(LD):34-39cm、ストッキング 脚の長さ(LG):60-69cm、
パンティストッキング/片足ストッキング 股下の長さ(LK):65-75cm

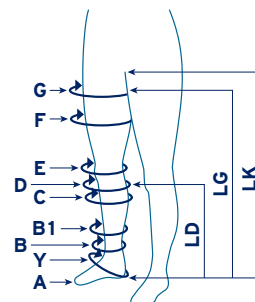



弾性ストッキング ジョブスト ベラバー2

2 31-43hPa (23-32mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために
必要な圧迫圧が持続。

ジョブスト ベラバー2 品種表


タイプ		ストッキング (シリコンなし)	パンティストッキング	片足ストッキング		片足パンティストッキング	
つま先タイプ		つま先なし		つま先なし		つま先なし	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
				左	右	左	右
サハラ	2(S)	JP-BL2TH2S	JP-BL2WS2S	JP-BL2CS2SL	JP-BL2CS2SR	JP-BL2KS2SL	JP-BL2KS2SR
	3(M)	JP-BL2TH3S	JP-BL2WS3S	JP-BL2CS3SL	JP-BL2CS3SR	JP-BL2KS3SL	JP-BL2KS3SR
	4(ML)	JP-BL2TH4S	JP-BL2WS4S	JP-BL2CS4SL	JP-BL2CS4SR	JP-BL2KS4SL	JP-BL2KS4SR
	5(L)	JP-BL2TH5S	JP-BL2WS5S	JP-BL2CS5SL	JP-BL2CS5SR	JP-BL2KS5SL	JP-BL2KS5SR
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥14,520 (¥13,200) 1足(2本)	¥29,700 (¥27,000) 1足	¥12,430 (¥11,300) 1足		¥28,490 (¥25,900) 1足	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラバー 医療機器届出番号:13B2X0016200005

採寸表

サイズ	適用周囲長				サイズ記入欄
	2(S)	3(M)	4(ML)	5(L)	
大腿部(G)	46-48	50-52	54-56	58-60	
大腿中央部(F)	42-44	45-47	48-50	51-53	
膝蓋骨(E)	32-34	35-37	38-40	41-43	
腓骨頭(D)	29-31	32-34	35-37	38-40	
ふくらはぎ(C)	31-33	34-36	37-39	40-42	
ふくらはぎ下部(B1)	25-26	27-28	29-30	31-32	
足首(B)	20-21	22-23	24-25	26-27	
足関節(Y)	29-30	31-32	33-34	35-36	
つま先(A)	20-21	22-23	24-25	26-27	

股下の長さ(LK):70-75cm 大腿部までの長さ(LG):69-74cm

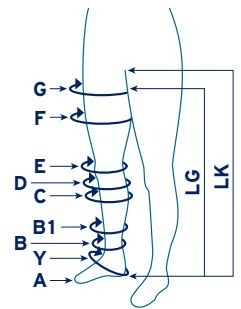

弾性ストッキング

ジョブスト soソフト20・30

20 19-29hPa (14-22mmHg)

30 27-40hPa (20-30mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。


ふだん使いもできる靴下風仕上げ

- ・汗を素早く吸収し、蒸散させてムレにくい素材。
- ・柔らかくて履きやすい独自の織り糸加工。

品種表		soソフト20	soソフト30
			
タイプ		ハイソックス	
つま先タイプ		つま先あり	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード
アイボリー	S	JP-SF20KSVC	JP-SF30KSVC
	M	JP-SF20KMVC	JP-SF30KMVC
	L	JP-SF20KLVC	JP-SF30KLVC
ブラック	S	JP-SF20KSBR	JP-SF30KSBR
	M	JP-SF20KMBR	JP-SF30KMBR
	L	JP-SF20KLBR	JP-SF30KLBR
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥4,895 (¥4,450) 1足(2本)	¥6,215 (¥5,650) 1足(2本)

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)			サイズ 記入欄
	S	M	L	
ふくらはぎ(C)	28-38	30-42	32-46	
足首(B)	18-21	21-25	25-29	

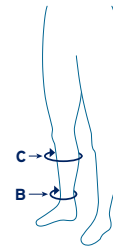

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト soソフト 医療機器届出番号:13B1X10103000026

ジョブスト soソフト



着圧ソックス

ジョブスト ライトウェア

11-20hPa (8-15mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

柔らかく自然な履き心地の着圧ソックス

- ・膝下部の食い込みを防ぐため、バンドを太くゆったり編みました。
- ・吸水性が高く、快適な履き心地です。

段階的
圧力設計
足首(最大)
20hPa
(15mmHg)



品種表			
			
タイプ		ハイソックス 男女兼用	
カラー	サイズ	製品コード	
ブラック	S	JP-LWS10KSBR	
	M	JP-LWS10KMBR	
	L	JP-LWS10KLBR	
アイボリー	S	JP-LWS10KSBR	
	M	JP-LWS10KMVR	
	L	JP-LWS10KLVR	
ホワイト	S	JP-LWS10KSWR	
	M	JP-LWS10KMWR	
	L	JP-LWS10KLWR	
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥3,102 (¥2,820) 1足(2本)	

サイズ表

靴のサイズでお選びください。			サイズ 記入欄
S	M	L	
21.5~23.5cm	24.0~26.0cm	26.5~28.0cm	

ジョブスト ライトウェアは医療機器ではありません。

ジョブスト ライトウェア



弾性ストッキング ジョブスト フォーメン アンビション20・30・40

20	20-27hPa (15-20mmHg)	30	27-40hPa (20-30mmHg)
40	40-53hPa (30-40mmHg)		

数値は足首部の圧迫圧です。

男性のライフスタイルや足形を考慮した弾性ストッキング。

- ・ニオイとムレを軽減するために、コットンと活性炭を含む生地を採用。




◀ 裏返しにした状態

品種表

品種表		フォーメン アンビション20	フォーメン アンビション30	フォーメン アンビション40
タイプ		ハイソックス		
つま先タイプ		つま先あり		
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード
ブラック	SS	JP-A20K1B	JP-A30K1B	JP-A40K1B
	S	JP-A20K2B	JP-A30K2B	JP-A40K2B
	M	JP-A20K3B	JP-A30K3B	JP-A40K3B
	L	JP-A20K4B	JP-A30K4B	JP-A40K4B
	2L	JP-A20K5B	JP-A30K5B	JP-A40K5B
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥5,302 (¥4,820) 1足(2本)	¥7,370 (¥6,700) 1足(2本)	¥9,350 (¥8,500) 1足(2本)

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)					サイズ 記入欄
	SS	S	M	L	2L	
ふくらはぎ(C)	28-36	30-40	34-44	38-50	44-56	
足首(B)	18-20	20-22	22-24	24-27	27-30	

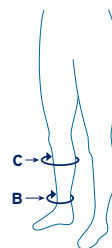

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト フォーメン アンビション 医療機器届出番号:13B1X10103000030

ジョブストフォーメンアンビション・ジョブストフォーメン



弾性ストッキング ジョブスト フォーメン30・40

30	27-40hPa (20-30mmHg)	40	40-53hPa (30-40mmHg)
----	----------------------	----	----------------------

数値は足首部の圧迫圧です。

ふとももまでサポートするメンズタイプ


- ・蒸れにくいマルチファイバー使用。
- ・ニオイを低減する防臭加工。

品種表

品種表		フォーメン30	フォーメン40
タイプ		ストッキング シリコングリップ付ドット	
つま先タイプ		つま先あり	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード
ブラック	S	JP-MB200SB	JP-MC200SB
	M	JP-MB200MB	JP-MC200MB
	L	JP-MB200LB	JP-MC200LB
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥12,320 (¥11,200) 1足(2本)	¥12,760 (¥11,600) 1足(2本)

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)			サイズ 記入欄
	S	M	L	
大腿部(G)	40-62	46-70	54-78	
ふくらはぎ(C)	28-38	30-42	32-46	
足首(B)	18-21	21-25	25-29	

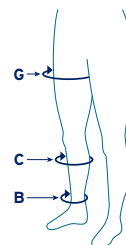


一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト フォーメン 医療機器届出番号:13B2X00162000004

ショートストレッチタイプの履き方・脱ぎ方

はじめに

- ・ たぐらないでください。履きづらくなります。
- ・ 必ず座って履いてください。立ちながら履くと、転倒するおそれがあります。
- ・ ゴム手袋を着用してください。


履き方

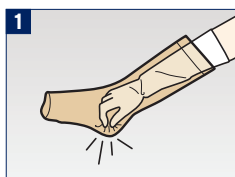

1
ストッキングの中に手を入れ、親指と人差し指でストッキングのかかと部をつまみます。




2
ストッキングを丸めないように徐々に裏返していきます。かかと部をつまんだまま、ストッキングを裏返します。

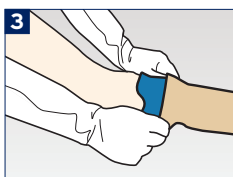

3
つま先なしの場合はフットスリップを履き、裏返したストッキングの内側を両手で広げ、つま先を奥に入れます。



4
次にかかとまで履きます。ストッキングを束にしないことが着用時のコツです。

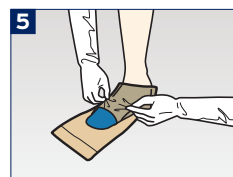

5
かかとが正しく収まっていることを確認し、足首までしっかりと入れます。



6
十分伸ばしながら少しずつたくし上げ、生地を皮膚に置いていくように着用します。フットスリップを抜き取ります。



7
生地が一箇所にたまるないようにしながら、ねじれ・たるみ・しわに注意しつつ、着用します。



8
最後に全体をなでて整え、踵部が正しい位置に収まっていることを確認します。

脱ぎ方




履いたときと逆の手順で、ストッキングの裏地をつかむようにして、段階的に引き下げます。

ロングストレッチタイプの履き方・脱ぎ方


はじめに

- ・ たぐらないでください。履きづらくなります。
- ・ 必ず座って履いてください。立ちながら履くと、転倒するおそれがあります。


履き方

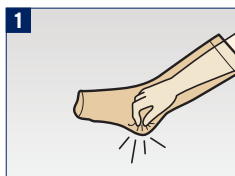


1
ストッキングの中に手を入れ、かかとの部分を内側から軽くつまみます。

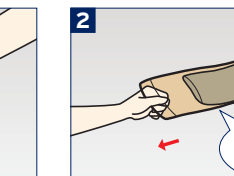

2
ストッキングを丸めないように裏返していきます。

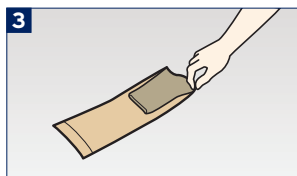


3
つまんだかかと部分まで裏返します。

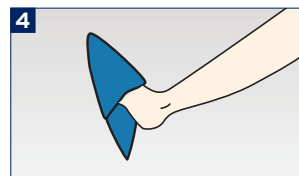

4
つま先なしの場合はフットスリップを履きます。



5
つま先を奥に入ればかかとまで履きます。

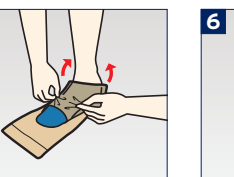


6
かかとの少し上を持ち、足首まで履きます。



7
ねじれ・たるみ・しわに注意しながら、少しずつたくしあげます。



8
最後に全体をなでて整えます。

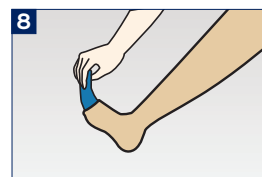


9
つま先の空いている部分からフットスリップを抜き取ります。

着用時のコツ


着脱の際は生地を束にしない

一般のストッキングのように弾性ストッキングを何重にも束ねると、硬く、伸びにくくなるため、着用できません。

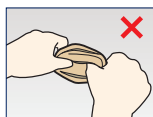


縦ではなく、横に引っ張りながら、着用する

弾性ストッキングはその名の通り、伸びるストッキングです。縦に引っ張りながら着用すると、膝の上まで生地がきてしまいます。

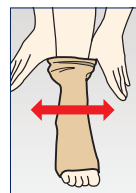

〈ハイソックスタイプの例〉


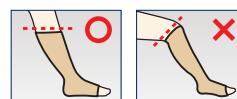


膝上まで生地がきている

脱ぎ方



1
ストッキングの生地を一枚持ち、足首まで脱ぎます。

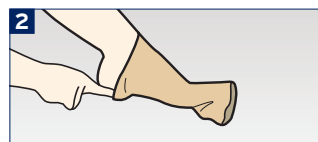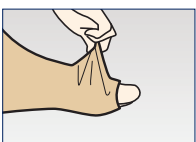

2
足首部まで脱げたら指を入れ、かかとを乗り越えます。



3
生地は束にせず、引っ張りながらつま先部分を脱ぎます。





弾性スリーブ ジョブスト ベラライト アームスリーブ

27-40hPa (20-30mmHg)

*前腕部

はじめてお使いの方におすすめのソフトな肌ざわり。

- 面倒なベルト装着がなく、扱いやすい形です。
- S、M、Lの3種類のサイズが揃っています。
- グローブタイプと合わせてお使いいただけます。


品種表

		
タイプ		アームスリーブ
		手首まで
カラー	サイズ	製品コード
	S	JP-LAS2
	M	JP-LAS3
	L	JP-LAS4
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥9,020 (¥8,200)
		1本

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラライト 医療機器届出番号:13B1X1010300027

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)			サイズ 記入欄
	S	M	L	
手首(C)	14-20	16-22	18-24	
前腕部(D)	18-23	23-29	29-34	
上端部(G)	22-40	27-45	33-51	

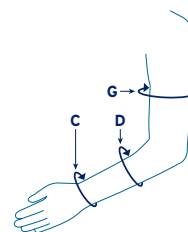

弾性スリーブ ジョブスト ベラライト グローブ

27-40hPa (20-30mmHg)

*掌部

アームスリーブと合わせて装着可能。

- S、M、Lの3種類のサイズが揃っています。


品種表

		
タイプ		グローブ
		ミトン型
カラー	サイズ	製品コード
	S	JP-LGL2
	M	JP-LGL3
	L	JP-LGL4
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥7,755 (¥7,050)
		1本

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラライト 医療機器届出番号:13B1X1010300027

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)			サイズ 記入欄
	S	M	L	
掌(B)	15-19	19-22	22-26	
手首(C)	14-20	16-22	18-24	

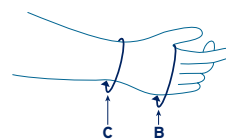



弾性スリーブ ジョブスト ベラ ストロング アームスリーブ

27-40hPa (20-30mmHg)

*前腕部

やや厚手の生地でしっかりしたフィット感。

- ・筋ポンプ作用の増強を目指し、伸びの小さい生地を採用しています。
- ・手首部分に過度な圧がかからないよう圧迫圧のピークを前腕部にしました。


品種表

		
タイプ		アームスリーブ 手首まで
カラー	サイズ	製品コード
	SS	JP-SAS1
	S	JP-SAS2
	M	JP-SAS3
	L	JP-SAS4
	LL	JP-SAS5
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥10,340 (¥9,400) 1本

一般名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラ ストロング 医療機器届出番号:13B1X10103000028

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)					サイズ 記入欄
	SS	S	M	L	LL	
手首(C)	14-18	14-18	14-18	17-20	19-22	
前腕部(D)	17-21	21-25	25-29	25-29	29-33	
上端部(G)	22-31	25-34	29-38	33-43	36-46	

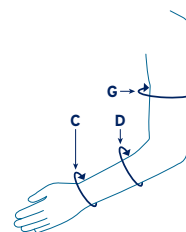

弾性スリーブ ジョブスト ベラ ストロング グローブ

27-40hPa (20-30mmHg)

*掌部

アームスリーブと合わせて装着可能。

- ・ミトン型と指付きグローブが揃っています。
- ・指付きグローブは平編みで縫い目のないシームレスタイプです。

品種表


			
タイプ		ミトン型 グローブ	指付き グローブ
カラー	サイズ	製品コード	製品コード
	S	JP-SGL2	JP-SGF2
	M	JP-SGL3	JP-SGF3
	L	JP-SGL4	JP-SGF4
	LL		JP-SGF5
	希望小売価格 (本体価格・税別)		¥7,755 (¥7,050) 1本

一般名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラ ストロング 医療機器届出番号:13B1X10103000028

採寸表

ミトン型 サイズ	適用周囲長 (単位:cm)			サイズ 記入欄
	S	M	L	
掌(B)	17-19	19-21	21-23	
手首(C)	14-18	18-21	19-22	

指付き サイズ	適用周囲長 (単位:cm)				サイズ 記入欄
	S	M	L	LL	
掌(B)	16.6-18.0	18.0-19.5	19.5-21.5	21.5-23.1	
手首(C)	16.7-18.1	17.0-18.5	17.2-18.7	18.3-20.1	

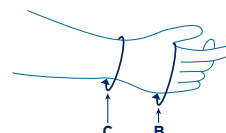

ジョブスト ベラ ストロング

圧迫補助パッド

ジョブスト ジョビパッド

圧迫力の加圧・分散・調整に

- ・ 独自にブレンドしたウレタンチップを使用しています。
- ・ 身体の様々な部位に使用できるように各種形状・サイズがあります。
- ・ 使用する部位に合わせてチャンネル(溝)をデザインしました。
- ・ 素材に肌触りのよいオーガニックコットンを使用(一部製品)。

*パッド中身の素材はポリウレタンです。

キドニーパッド

外側胸部、大腿内側、膝下など
圧迫しにくい骨や関節周囲などの
圧迫補助に



生地素材	オーガニックコットン・ポリウレタン	
サイズ	S	8×18cm
	M	13×25cm
	L	18×33cm

スクエアパッド

前脛骨部分などの
圧迫補助に



生地素材	オーガニックコットン・ポリウレタン	
サイズ	S	10×20cm
	L	10×30cm

オーバルパッド


ひざ裏、大腿部などの
圧迫補助に



生地素材	オーガニックコットン・ポリウレタン	
サイズ	13×20cm	

ラウンドパッド

関節部などのくい込みやすい部分、
小さい部位の圧迫補助に

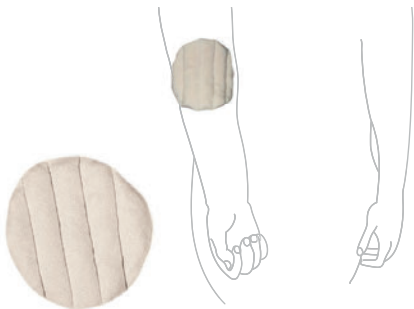

生地素材	オーガニックコットン・ポリウレタン	
サイズ	直径 13cm	

手背パッド

手背部分の圧迫補助に



生地素材	オーガニックコットン・ポリウレタン	
サイズ	14×10cm	

くるぶしパッド

内踝、外踝部の
圧迫補助に



生地素材	オーガニックコットン・ポリウレタン	
サイズ	長さ 18cm	

下腹部パッド(女性用)

下腹部・陰部の圧迫補助に



生地素材	ポリエステル		
サイズ	XS	ヒップ 周径	86~112cm
	S		102~127cm
	M		112~137cm

下腹部パッド(男性用)


下腹部・陰部の
圧迫補助に



生地素材	ポリエステル				
サイズ	S	ヒップ 周径	91~117cm	陰囊 周径	26cm
	M		102~127cm		36cm
	L		112~137cm		42cm





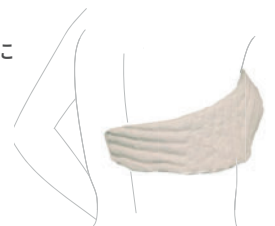




乳房パッド

乳房から側胸部に
かけての圧迫や
下着による
締め付けからの
保護として



生地素材	ポリエステル		
サイズ	S	トップサイズと アンダーサイズの 長さの差	5cm未満
	M		5~10cm
	L		10~15cm

品種表

品名	サイズ	製品コード	カラー	包装単位	希望小売価格 (本体価格・税別)	
 キドニーパッド	S	JP-PMK2	アイボリー	1個	¥4,917 (¥4,470)	
	M	JP-PMK3			¥5,434 (¥4,940)	
	L	JP-PMK4			¥5,951 (¥5,410)	
 スクエアパッド	S	JP-PMT2			¥3,883 (¥3,530)	
	L	JP-PMT4			¥4,532 (¥4,120)	
 オーバルパッド	—	JP-PMV			¥4,532 (¥4,120)	
 ラウンドパッド	—	JP-PMR			¥4,400 (¥4,000)	
 手背パッド	—	JP-PMD			¥4,917 (¥4,470)	
 くるぶしパッド	—	JP-PMM			¥2,849 (¥2,590)	
 下腹部パッド(女性用)	XS	JP-PGF1			¥9,702 (¥8,820)	
	S	JP-PGF2				
	M	JP-PGF3				
 下腹部パッド(男性用)	S	JP-PGM2				¥12,672 (¥11,520)
	M	JP-PGM3				
	L	JP-PGM4				
 乳房パッド	S	JP-PPL2	¥10,604 (¥9,640)			
	M	JP-PPL3				
	L	JP-PPL4				

各種機能バンデージ

	サイズ*	希望小売価格 (本体価格・税別)	製品コード
指包帯(ガーゼ包帯) エラストムル 手足の指の可動に対応する設計。	 4cm×4m	20ロール/箱 ¥1,804 (¥1,640)	JW-EM02094
	6cm×4m	20ロール/箱 ¥2,200 (¥2,000)	JW-EM02095
筒状包帯 トリコフィックス 汗を吸収し、皮膚を保護。 100%コットン素材で、 ソフトな肌ざわり。	 6cm×20m	1ロール/箱 ¥2,651 (¥2,410)	JC-TF02195
	8cm×20m	1ロール/箱 ¥3,069 (¥2,790)	JC-TF02197
	10cm×20m	1ロール/箱 ¥3,553 (¥3,230)	JC-TF02198
	12cm×20m	1ロール/箱 ¥4,103 (¥3,730)	JC-TF02199
パディング包帯 アーティフレックス 皮膚を保護。 ウレタンフォーム等の固定。	 10cm×3m	30ロール/箱 ¥11,286 (¥10,260)	JC-AF09046
	15cm×3m	20ロール/箱 ¥10,340 (¥9,400)	JC-AF09047
低伸縮弾性包帯 コンプリラン 運動時の高圧迫力と静止時の 低圧迫力を可能にする ショートストレッチ包帯。	 6cm×5m	1ロール/箱 ¥902 (¥820)	JP-CR01026
	8cm×5m	1ロール/箱 ¥1,166 (¥1,060)	JP-CR01027
	10cm×5m	1ロール/箱 ¥1,419 (¥1,290)	JP-CR01028
	12cm×5m	1ロール/箱 ¥1,683 (¥1,530)	JP-CR01029
バンデージ固定包帯 イデアルビンデ 下肢の各バンデージ類を固定時に使用。	20cm×5m	6ロール/箱 ¥10,890 (¥9,900)	JC-IB01959
ウレタンロール コンプリフォーム 皮膚を保護し、バンデージの 圧力を均一に分散。	 10cm×2.5m	1ロール/箱 ¥2,068 (¥1,880)	JC-CF75294
	12cm×2.5m	1ロール/箱 ¥2,376 (¥2,160)	JC-CF75295

*伸ばした状態での長さになります。

	サイズ*	希望小売価格 (本体価格・税別)	製品コード
筒状包帯 デルタ テリーネットS チューブ状で衣類のように装着可能。 タオル地のような肌触り。 	5cm×13.5m	1本/箱 ¥7,502 (¥6,820)	JC-TN050
	7.5cm×13.5m	1本/箱 ¥9,702 (¥8,820)	JC-TN075
	10cm×13.5m	1本/箱 ¥13,321 (¥12,110)	JC-TN100
	12.5cm×13.5m	1本/箱 ¥16,170 (¥14,700)	JC-TN125
	15cm×13.5m	1本/箱 ¥19,404 (¥17,640)	JC-TN150
筒状包帯 テソグリップ 軽度の伸縮性がある チューブ状の包帯なので、 衣類のように履くだけで装着が可能。 	7.5cm×10m	1本/箱 ¥6,468 (¥5,880)	JC-TG0750
	8.75cm×10m	1本/箱 ¥6,787 (¥6,170)	JC-TG0875
	10cm×10m	1本/箱 ¥7,117 (¥6,470)	JC-TG1000
	12cm×10m	1本/箱 ¥9,702 (¥8,820)	JC-TG1200
	17.5cm×10m	1本/箱 ¥12,287 (¥11,170)	JC-TG1750
自着性高圧迫力弾性包帯 コンプリハフト 運動時の高圧迫力と静止時の 低圧迫力を可能にする ショートストレッチ包帯。 包帯同士が互いにくっつく自着性が あり、ずれやゆるみがおきにくい。 	8cm×5m	1ロール/箱 ¥1,936 (¥1,760)	JP-CH45958
	10cm×5m	1ロール/箱 ¥2,156 (¥1,960)	JP-CH45959
自着性不織布弾性包帯 コープラス ナイロン不織布と弾力糸から成る 自着性弾力包帯。 包帯同士が互いにくっつく自着性が あり、ずれやゆるみがおきにくい。 	2.5cm×3.0m	60ロール/箱 ¥21,978 (¥19,980)	JW-CP721006
	5.0cm×3.0m	36ロール/箱 ¥20,196 (¥18,360)	JW-CP721008
	7.5cm×3.0m	24ロール/箱 ¥17,556 (¥15,960)	JW-CP721009
	10.0cm×3.0m	18ロール/箱 ¥16,632 (¥15,120)	JW-CP721004

*伸ばした状態での長さになります。

弾性ストッキングのお手入れ方法

長くお使いいただくために

洗濯表示



水または40度以下のぬるま湯に市販の中性洗剤を溶かし、洗濯機で洗う場合には洗濯ネットをご使用ください。



漂白剤および柔軟剤のご使用は避けてください。



直射日光を避け、陰干しにすること。乾燥機を使用する場合には、60℃以下で使用すること。



ドライクリーニングはしないでください。



アイロンがけはしないでください。

ご注意:洗濯を他のものと同時にする場合には、色落ちのおそれがあるためご注意ください。

バンテージのお手入れ方法

長くお使いいただくために

弾性包帯やコットン素材の筒状包帯などは、直接皮膚にふれ、汗を吸い込むものですから、こまめに洗って清潔にしておくよう心掛けてください。

※弾性包帯とコットン素材の包帯では、取扱いが異なりますので、ご注意ください。

弾性包帯

洗濯は香料の少ないせっけん洗剤などをお使いになるようおすすめします。基本的には押し洗いをしますが、ネットに入れて、洗濯機で洗うこともできます。

弾性包帯は、汚れや体内からの皮脂や塩分が繊維に入り込むと、伸縮性が低下し、劣化しやすいため、1週間に1回、多くて2~3回くらいの頻度で洗濯してください。*

禁止:弾性繊維の劣化の原因になりますので、以下の取り扱いは避けてください。



コットン・ウレタン素材包帯

洗濯機で洗う場合は、劣化を防ぐため、必ずネットに入れてください。


コットン素材の包帯、ウレタンからつくられるスポンジ類は、柔軟剤を使うことができます。

禁止:素材をいためますので、以下の取り扱いは避けてください。



干す際には、一箇所に圧が加わらないように、図のように蛇行させ、包帯の面を平らにして干すようにしてください。直射日光を避け、風通しのよい場所で陰干ししてください。

色の違うものと一緒に、つけ置きや洗濯をしないでください。

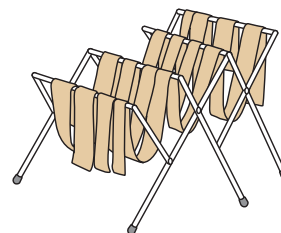

*自着性包帯は除く