

弾性ストッキングのお手入れ方法

長くお使いいただくために

洗濯表示



水または40度以下のぬるま湯に市販の中性洗剤を溶かし、洗濯機で洗う場合には洗濯ネットをご使用ください。



直射日光を避け、陰干しにすること。乾燥機を使用する場合には、60°C以下で使用するこ



と。ドライクリーニングはしないでください。



アイロンがけはしないでください。



漂白剤および柔軟剤のご使用は避けてください。

ご注意：洗濯を他のものと同時にする場合には、色落ちのおそれがあるためご注意ください。

バンデージのお手入れ方法

長くお使いいただくために

弾性包帯やコットン素材の筒状包帯などは、直接皮膚にふれ、汗を吸い込むものですから、こまめに洗って清潔にしておくよう心掛けてください。
※弾性包帯とコットン素材の包帯では、取扱いが異なりますので、ご注意ください。


弾性包帯

洗濯は香料の少ないせっけん洗剤などをお使いになるようおすすめします。基本的には押し洗いをしますが、ネットに入れて、洗濯機で洗うこともできます。弾性包帯は、汚れや体内からの皮脂や塩分が繊維に入り込むと、伸縮性が低下し、劣化しやすいため、1週間に1回、多くて2～3回くらいの頻度で洗濯してください。*

禁止：弾性繊維の劣化の原因になりますので、以下の取扱いは避けてください。



干す際には、一箇所に圧が加わらないように、図のように蛇行させ、包帯の面を平らにして干すようにしてください。直射日光を避け、風通しのよい場所で陰干ししてください。色の違うものと一緒に、つけ置きや洗濯をしないでください。

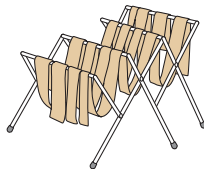

* 自着性包帯は除く

JOBST



ウルトラシアアー20・30

ウルトラシアアーC

soソフト

フォーメン アンビション

フォーメン

オパーク1・2

ライトウェア

ファロークイック

バンデージ

川本産業株式会社
大阪市中央区谷町2丁目6番4号
●お客様相談窓口 ☎06-6943-8956
(10:00～17:00月～金ただし祝日を除く)
<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

essity

ジョブスト® 製品ラインアップカタログ


「ジョブスト」は、ドイツの医療機器メーカー「BSN medical社」により、約70カ国*で販売されている弾性ストッキングのブランド名です。

*2019年7月現在

『ジョブスト』は、独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、下肢静脈における血液還流を促進します。

充実のラインアップ

圧迫圧の違いに加えて、パンティストッキング、ストッキング、ハイソックスなどのタイプをラインアップ。つま先のあり・なしタイプや女性用・男性用のラインアップで、幅広い年齢層の方々にお選びいただくことができます。

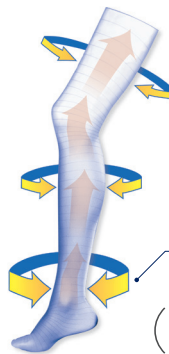

高い通気性で、ムレにくく素肌のようなフィット感のある履き心地。

最大圧
段階的圧迫圧
(足首を最大に徐々に圧力を弱めています。)



ジョブスト ウルトラシアアー

20~27hPa (15~20mmHg)

27~40hPa (20~30mmHg)

フィット感とファッション性の両立

- ・キレイな透け感
- ・高い通気性
- ・光沢のある柔らかい編み糸

シルキー
ベージュ

ブラック

※ウルトラシアアーCはサンドのみ



ジョブスト soソフト

19~29hPa (14~22mmHg)

27~40hPa (20~30mmHg)

ふだん使いもできる靴下風仕上げ

- ・柔らかな織り糸
- ・汗を素早く吸収し、蒸散することでムレを軽減
- ・柔らかくて履きやすいソックスタイプ

アイボリー

ブラック



ジョブスト フォーメン アンビション

20~27hPa (15~20mmHg)

27~40hPa (20~30mmHg)

40~53hPa (30~40mmHg)

男性の足型やライフスタイルを考慮

- ・工夫した素材で蒸れにくい
- ・活性炭入りの糸を用いてニオイを低減
- ・コットン使用で履き心地と肌触りを追求

ブラック



ジョブスト フォーメン

27~40hPa (20~30mmHg)

40~53hPa (30~40mmHg)

男性の足型やライフスタイルを考慮した太もも丈の弾性ストッキング

- ・丈夫で長持ち
- ・足のニオイを低減
- ・優れた蒸散性でムレにくい

ブラック



ジョブスト オパーク

24~28hPa (18~21mmHg)

31~43hPa (23~32mmHg)

履きやすさと着用中の不快感軽減を追求

- ・厚手で透けにくいタイツ生地タイプ
- ・湿気を素早く吸収し蒸散させる糸を使用
- ・ソフトな肌触り

ベージュ

ブラック

弾性ストッキングを選ぶポイント

1. ストッキングのタイプ



ハイソックス
つま先あり



ハイソックス
つま先なし



ストッキング
つま先あり



ストッキング
つま先なし





パンティストッキング



マタニティ
*ウルトラシアアのみ

2. ストッキングのサイズ:計測ポイント

- 足首(B)ポイントを計測してサイズを選択してください。
- サイズ選択は基本的に足首(B)ポイントを優先させてください。
- サイズが2サイズにまたがる場合は、ふくらはぎサイズを見ながら大きいサイズをお選びください。

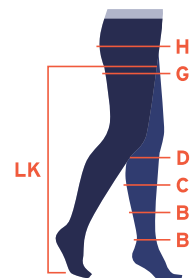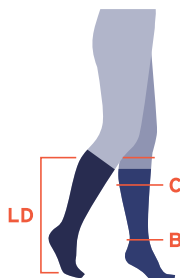

H : ヒップ
G : 大腿部
D : 腓骨頭
C : ふくらはぎ
B1 : ふくらはぎ下部
B : 足首
LK : 股下の長さ
LG : 足の長さ
LD : 膝下の長さ

3. 圧迫圧の種類

20~27hPa(15~20mmHg)

27~40hPa(20~30mmHg)

40~53hPa(30~40mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。




ジョブスト ウルトラシアー20

履き心地と透明感に 「弾性ストッキング」

- ・伸びの良い素材を使用し、に配慮しています。
- ・履きやすく、通気性もよく、すべりをよくして着用を補助するフットスリップ付です（つま先なしのみ）

- 優れた
フィット感、ファッション性
- 快適な履き心地です。
- 助するフットスリップ付です。

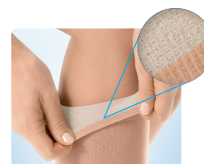

ハイソックス
ソフトフィット



ストッキング
センチティフグリッパ

着用中のバンド部のずり落ちや締め付けを防ぎ、より適正な圧力勾配を意図した設計

*シリコンコーティングされた細い糸と弾性糸を編んだメッシュ生地を膝バンド部内側に採用






バンド部の皮膚トラブル低減を目指した仕様のシリコングリッパ

20~27hPa(15~20mmHg) 数値は足首部の圧迫圧です。


カラー サイズ	つま先あり		[包 装単位] 希望 小売 価格 (本 体価格)	つま先なし		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	
	シルキーベージュ	ブラック		シルキーベージュ	ブラック		
ハイソックス ショート 	S	JP-U20KSS1	JP-U20KSB1	1足(2本)／箱 4,730円 (4,300円)			
	M	JP-U20KMS1	JP-U20KMB1				
	L	JP-U20KLS1	JP-U20KLB1				
	XL	JP-U20KXS1	JP-U20KXB1				
ハイソックス レギュラー 	S	JP-U20KSS	JP-U20KSB	1足(2本)／箱 4,730円 (4,300円)	JP-U21KSS	JP-U21KSB	1足(2本)／箱 4,950円 (4,500円)
	M	JP-U20KMS	JP-U20KMB		JP-U21KMS	JP-U21KMB	
	L	JP-U20KLS	JP-U20KLB		JP-U21KLS	JP-U21KLB	
	XL	JP-U20KXS	JP-U20KXB		JP-U21KXS	JP-U21KXB	
ハイソックス ソフトフィット 	S	JP-U20KSSF	JP-U20KSBF	1足(2本)／箱 4,950円 (4,500円)			
	M	JP-U20KMSF	JP-U20KMBF				
	L	JP-U20KLSF	JP-U20KLBF				
	XL	JP-U20KXSF	JP-U20KXBF				

ジョブストウルトラシア-20

20~27hPa(15~20mmHg) 数値は足首部の圧迫圧です。

カラー サイズ	つま先あり		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	つま先なし		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)
	シルキーベージュ	ブラック		シルキーベージュ	ブラック	
ストッキング シリコン グリップ付 ドット   イメージ図	S			JP-U21TSS	JP-U21TSB	1足(2本)/箱 5,940円 (5,400円)
	M			JP-U21TMS	JP-U21TMB	
	L			JP-U21TLS	JP-U21TLB	
	XL			JP-U21TXS	JP-U21TXB	
ストッキング センシティブ グリップ 	S	JP-U20TSSV	JP-U20TSBV	1足(2本)/箱 5,940円 (5,400円)		
	M	JP-U20TMSV	JP-U20TMBV			
	L	JP-U20TLSV	JP-U20TLBV			
	XL	JP-U20TXSV	JP-U20TXBV			
パンティ ストッキング 	S	JP-U20WSS	JP-U20WSB	1足 /箱 6,380円 (5,800円)		
	M	JP-U20WMS	JP-U20WMB			
	L	JP-U20WLS	JP-U20WLB			
マタニティ 	S	JP-U20MSS		1足 /箱 10,670円 (9,700円)		
	M	JP-U20MMS				
	L	JP-U20MLS				

採寸表

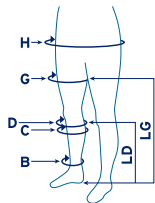

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)				
	足首 (B)	ふくらはぎ (C)	大腿部 (G)	ヒップ(H)	
				パンティ ストッキング	マタニティ
S	18-21	28-38	40-62	71-117	81-132
M	21-25	30-42	46-70	76-127	86-142
L	25-29	32-46	54-78	81-137	91-152
XL	29-33	34-50	60-81	—	—

<適用肢長> ハイソックス 膝下の長さ(LD):レギュラータイプ >38cm、ショートタイプ ≤38cm
 ストッキング 大腿部(股下5cm)までの長さ (LG): >68.5cm

<採寸表について>

- サイズの選択は基本的にB(足首)ポイントを優先させてください。
- Bポイントの値が2サイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。
- H(ヒップ)ポイントの測定は、ハイソックス、ストッキングをお選びの方は不要です。
- G(大腿部)ポイントの測定は、ハイソックスをお選びの方は不要です。




ジョブスト ウルトランサー-30

しっかりした圧迫圧 優れた「弾性ストッキング」と、ファッション性に「ング」

- ・高い通気性、素肌のようなです。
- ・圧迫圧はそのままに、履きやすさを向上させています。
- ・すべりをよくして着用を補助するフットスリップ付です。(つま先なしのみ)

フィット感のある履き心地です。

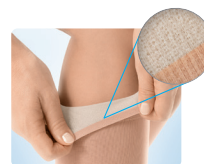

ハイソックス
ソフトフィット



ストッキング
センシティブリップ

着用中のバンド部のずり落ちや締め付けを防止、より適正な圧力勾配を意図した設計

バンド部の皮膚トラブル低減を目指した仕様のシリコングリップ






*シリコンコーティングされた細い糸と弾性糸を編んだメッシュ生地を膝バンド部内側に採用

27~40hPa (20~30mmHg) 数値は足首部の圧迫圧です。


カラー サイズ	つま先あり		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	つま先なし		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	
	シルキーベージュ	ブラック		シルキーベージュ	ブラック		
ハイソックス ショート 	S	JP-U30KSS1	JP-U30KSB1	1足(2本)／箱 6,490円 (5,900円)	JP-U31KSS1	JP-U31KSB1	1足(2本)／箱 6,490円 (5,900円)
	M	JP-U30KMS1	JP-U30KMB1		JP-U31KMS1	JP-U31KMB1	
	L	JP-U30KLS1	JP-U30KLB1		JP-U31KLS1	JP-U31KLB1	
	XL	JP-U30KXS1	JP-U30KXB1		JP-U31KXS1	JP-U31KXB1	
ハイソックス レギュラー 	S	JP-U30KSS	JP-U30KSB	1足(2本)／箱 6,490円 (5,900円)	JP-U31KSS	JP-U31KSB	1足(2本)／箱 6,490円 (5,900円)
	M	JP-U30KMS	JP-U30KMB		JP-U31KMS	JP-U31KMB	
	L	JP-U30KLS	JP-U30KLB		JP-U31KLS	JP-U31KLB	
	XL	JP-U30KXS	JP-U30KXB		JP-U31KXS	JP-U31KXB	
ハイソックス ソフトフィット 	S	JP-U30KSSF	JP-U30KSBF	1足(2本)／箱 6,490円 (5,900円)			
	M	JP-U30KMSF	JP-U30KMBF				
	L	JP-U30KLSF	JP-U30KLBF				
	XL	JP-U30KXSF	JP-U30KXBF				

ジョブストウルトラシア-30

27~40hPa(20~30mmHg) 数値は足首部の圧迫圧です。

カラー サイズ	つま先あり		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	つま先なし		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)
	シルキーベージュ	ブラック		シルキーベージュ	ブラック	
ストッキング シリコン グリップ付 ドット   イメージ図	S			JP-U31TSS	JP-U31TSB	1足(2本)/箱 7,370円 (6,700円)
	M			JP-U31TMS	JP-U31TMB	
	L			JP-U31TLS	JP-U31TLB	
	XL			JP-U31TXS	JP-U31TXB	
ストッキング センシティブ グリップ 	S	JP-U30TSSV	JP-U30TSBV	1足(2本)/箱 7,370円 (6,700円)		
	M	JP-U30TMSV	JP-U30TMBV			
	L	JP-U30TLSV	JP-U30TLBV			
	XL	JP-U30TXSV	JP-U30TXBV			
パンティ ストッキング 	S	JP-U30WSS		1足 /箱 7,810円 (7,100円)		
	M	JP-U30WMS				
	L	JP-U30WLS				
マタニティ 	S	JP-U30MSS		1足 /箱 11,330円 (10,300円)		
	M	JP-U30MMS				
	L	JP-U30MLS				

採寸表

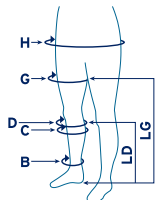

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)				
	足首 (B)	ふくらはぎ (C)	大腿部 (G)	ヒップ(H)	
				パンティ ストッキング	マタニティ
S	18-21	28-38	40-62	71-117	81-132
M	21-25	30-42	46-70	76-127	86-142
L	25-29	32-46	54-78	81-137	91-152
XL	29-33	34-50	60-81	—	—

<適用肢長> ハイソックス 膝下の長さ(LD):レギュラータイプ >38cm、ショートタイプ ≤38cm
 ストッキング 大腿部(股下5cm)までの長さ (LG): >68.5cm

<採寸表について>

- ・サイズの選択は基本的にB(足首)ポイントを優先させてください。
- ・Bポイントの値が2サイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。
- ・H(ヒップ)ポイントの測定は、ハイソックス、ストッキングをお選びの方は不要です。
- ・G(大腿部)ポイントの測定は、ハイソックスをお選びの方は不要です。



ジョブスト ウルトラシアーク

ウルトラシアーク20・30とは
生地が異なるシアークタイプ

- ・履き心地を重視した生地を使用。
- ・全てつま先なしタイプとなっているため、すべりをよくして着用を補助するフットスリップ付きです。



ジョブスト soソフト

ふだん使いもできる
靴下風仕上げ

- ・汗を素早く吸収し、蒸散させるムレにくい素材。
- ・柔らかくて履きやすい独自の織り糸加工。




31~43hPa(23~32mmHg) 数値は足首部の圧迫圧です。

カラー サイズ	つま先なし		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)
	サンド		
ストッキング シリコンなし 	S	JP-UC286SS	1足(2本)/箱 16,720円 (15,200円)
	M	JP-UC286MS	
	ML	JP-UC286XS	
	L	JP-UC286LS	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ウルトラシアーク
医療機器届出番号:27B1X00006650302

採寸表

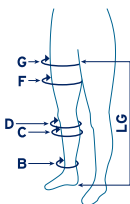

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)				
	足首 (B)	ふくらはぎ (C)	腓骨頭 (D)	大腿中央部 (F)	大腿部 (G)
S	20-22	30-37	29-36	41-56	45-62
M	22-24	33-40	32-39	44-60	49-67
ML	24-26	35-43	34-42	47-65	53-72
L	26-28	37-46	36-45	50-69	56-77

<適用肢長> 大腿部(股下5cm)までの長さ(LG):
ストッキング シリコンなし 60-69cm

<採寸表について>

- ・サイズの選択は基本的にB(足首)ポイントを優先させてください。
- ・Bポイントの値が2サイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。

soソフト20

19~29hPa(14~22mmHg) 数値は足首部の圧迫圧です。

カラー サイズ	つま先あり		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	
	アイボリー	ブラック		
ハイソックス 	S	JP-SF20KSVC	JP-SF20KSBR	1足(2本)/箱 5,390円 (4,900円)
	M	JP-SF20KMVC	JP-SF20KMBR	
	L	JP-SF20KLVLC	JP-SF20KLBR	


soソフト30

27~40hPa(20~30mmHg) 数値は足首部の圧迫圧です。

カラー サイズ	つま先あり		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	
	アイボリー	ブラック		
ハイソックス 	S	JP-SF30KSVC	JP-SF30KSBR	1足(2本)/箱 6,820円 (6,200円)
	M	JP-SF30KMVC	JP-SF30KMBR	
	L	JP-SF30KLVLC	JP-SF30KLBR	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト soソフト
医療機器届出番号:27B1X00006650503

採寸表

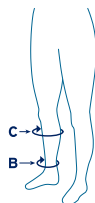

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)	
	足首 (B)	ふくらはぎ (C)
S	18-21	28-38
M	21-25	30-42
L	25-29	32-46

<採寸表について>

- ・サイズの選択は基本的にB(足首)ポイントを優先させてください。
- ・Bポイントの値が2サイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。



ジョブスト フォーメン アンビション

男性のライフスタイルや足型を
考慮した弾性ストッキング

- ・ニオイとムレを軽減するために、コットンと活性炭を含む生地を採用。




裏返しにした状態

		フォーメン アンビション20	フォーメン アンビション30	フォーメン アンビション40
数値は足首部の 圧迫圧です。		20~27hPa (15~20mmHg)	27~40hPa (20~30mmHg)	40~53hPa (30~40mmHg)
		つま先あり		
カラー サイズ		ブラック		
 ハイソックス	SS	JP-A20K1B	JP-A30K1B	JP-A40K1B
	S	JP-A20K2B	JP-A30K2B	JP-A40K2B
	M	JP-A20K3B	JP-A30K3B	JP-A40K3B
	L	JP-A20K4B	JP-A30K4B	JP-A40K4B
	2L	JP-A20K5B	JP-A30K5B	JP-A40K5B
[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)		1足(2本)／箱 5,830円 (5,300円)	1足(2本)／箱 8,140円 (7,400円)	1足(2本)／箱 10,340円 (9,400円)

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト フォーメン アンビション
医療機器届出番号:27 B1X 0 0 0 0 6 6 5 2 3 1 2

採寸表

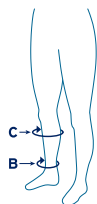

	適用周囲長 (単位:cm)	
サイズ	足首 (B)	ふくらはぎ (C)
SS	18-20	28-36
S	20-22	30-40
M	22-24	34-44
L	24-27	38-50
2L	27-30	44-56

<採寸表について>

- ・サイズの選択は基本的にB(足首)ポイントを優先させてください。
- ・Bポイントの値が2サイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。



ジョブスト フォーメン


ふとももまでサポートする
メンズタイプ

- ・蒸れにくいマルチファイバー使用。
- ・ニオイを低減する防臭加工。

		フォーメン30	フォーメン40
数値は足首部の 圧迫圧です。		27~40hPa (20~30mmHg)	40~53hPa (30~40mmHg)
		つま先あり	
カラー サイズ		ブラック	
 ストッキング シリコン グリップ付 (ドット)	S	JP-MB200SB	JP-MC200SB
	M	JP-MB200MB	JP-MC200MB
	L	JP-MB200LB	JP-MC200LB
	[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	1足(2本)／箱 13,530円 (12,300円)	1足(2本)／箱 14,080円 (12,800円)

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト フォーメン
医療機器届出番号:27 B1X 0 0 0 0 6 6 5 2 1 1 1

採寸表

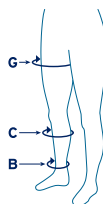

	適用周囲長 (単位:cm)		
サイズ	足首 (B)	ふくらはぎ (C)	大腿部 (G)
S	18-21	28-38	40-62
M	21-25	30-42	46-70
L	25-29	32-46	54-78

<採寸表について>

- ・サイズの選択は基本的にB(足首)ポイントを優先させてください。
- ・Bポイントの値が2サイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。

ジョブストフォーメンアンビション・ジョブストフォーメン



ジョブスト オペーク1

様々な世代やライフスタイルに対応する、厚手で透けにくいタイツ生地

- ・血管の浮きが目立ちにくい仕様。
- ・ムレにくく快適な履き心地を実現する、吸水性の高い糸を採用。
- ・カバーされた弾性糸で履きやすくなっています。

24~28hPa(18~21mmHg) 数値は足首部の圧迫圧です。

カラー サイズ	つま先あり		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	つま先なし		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	
	ベージュ	ブラック		ベージュ	ブラック		
ハイソックス 	SS	JP-Q10K1S	JP-Q10K1B	1足(2本)／箱 6,820円 (6,200円)	JP-Q11K1S	JP-Q11K1B	1足(2本)／箱 6,820円 (6,200円)
	S	JP-Q10K2S	JP-Q10K2B		JP-Q11K2S	JP-Q11K2B	
	M	JP-Q10K3S	JP-Q10K3B		JP-Q11K3S	JP-Q11K3B	
	L	JP-Q10K4S	JP-Q10K4B		JP-Q11K4S	JP-Q11K4B	
	2L	JP-Q10K5S	JP-Q10K5B		JP-Q11K5S	JP-Q11K5B	
	3L	JP-Q10K6S	JP-Q10K6B		JP-Q11K6S	JP-Q11K6B	
ストッキング シリコン グリップ付 ドット 	SS	JP-Q10T1S	JP-Q10T1B	1足(2本)／箱 14,520円 (13,200円)	JP-Q11T1S	JP-Q11T1B	1足(2本)／箱 14,520円 (13,200円)
	S	JP-Q10T2S	JP-Q10T2B		JP-Q11T2S	JP-Q11T2B	
	M	JP-Q10T3S	JP-Q10T3B		JP-Q11T3S	JP-Q11T3B	
	L	JP-Q10T4S	JP-Q10T4B		JP-Q11T4S	JP-Q11T4B	
	2L	JP-Q10T5S	JP-Q10T5B		JP-Q11T5S	JP-Q11T5B	
	3L	JP-Q10T6S	JP-Q10T6B		JP-Q11T6S	JP-Q11T6B	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト オペーク 医療機器届出番号:27B1X00006650905


ジョブスト オペーク

ジョブスト オパーク1

24~28hPa (18~21 mmHg) 数値は足首部の圧迫圧です。

カラー サイズ	つま先あり		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	つま先なし		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	
	ベージュ	ブラック		ベージュ	ブラック		
パンティ ストッキング 	SS	JP-Q10W1S	JP-Q10W1B	1足 /箱 26,400円 (24,000円)	JP-Q11W1S	JP-Q11W1B	1足 /箱 26,400円 (24,000円)
	S	JP-Q10W2S	JP-Q10W2B		JP-Q11W2S	JP-Q11W2B	
	M	JP-Q10W3S	JP-Q10W3B		JP-Q11W3S	JP-Q11W3B	
	L	JP-Q10W4S	JP-Q10W4B		JP-Q11W4S	JP-Q11W4B	
	2L	JP-Q10W5S	JP-Q10W5B		JP-Q11W5S	JP-Q11W5B	
	3L	JP-Q10W6S	JP-Q10W6B		JP-Q11W6S	JP-Q11W6B	

採寸表

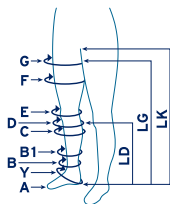

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)									
	つま先 (A)	足関節 (Y)	足首 (B)	ふくらはぎ下部 (B1)	ふくらはぎ (C)	腓骨頭 (D)	膝蓋骨 (E)	大腿中央部 (F)	大腿部 (G)	大腿部シリコンバンド (G)
SS	17-22	26-31	18-20	23-27	28-34	27-33	30-37	39-52	43-57	43-48
S	19-24	28-33	20-22	24-29	30-37	29-36	33-40	41-56	45-62	45-52
M	21-26	29-35	22-24	26-32	33-40	32-39	35-43	44-60	49-67	49-56
L	23-29	31-37	24-26	29-35	35-43	34-42	37-45	47-65	53-72	53-60
2L	25-32	32-38	26-28	31-37	37-46	36-45	39-48	50-69	56-77	56-64
3L	27-34	33-40	28-30	33-39	39-49	38-48	41-51	53-73	60-81	60-68

<適用肢長> ハイソックス 膝下の長さ(LD):34-39 cm、ストッキング 脚の長さ(LG):60-69cm、
 パンティストッキング 股下の長さ(LK): 65-75cm

<採寸表について>

- ・サイズの選択は基本的にB(足首)ポイントを優先させてください。
- ・Bポイントの値が2サイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。
- ・G(大腿部)ポイントの測定は、ハイソックスをお選びの方は不要です。



ジョブスト オペーク2

*さらに圧迫圧の強いジョブスト オペーク3
足首部 45~62hPa(34~46mmHg)もごさいます。

中程度の圧迫圧でしっかりサポート

- 血管の浮きが目立ちにくい、厚手で透けにくいタイツ生地。
- ムレにくく快適な履き心地を実現する、吸水性の高い糸を採用。
- カバーされた弾性糸で履きやすくなっています。

31~43hPa(23~32mmHg) 数値は足首部の圧迫圧です。

カラー サイズ	つま先あり		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	つま先なし		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	
	ベージュ	ブラック		ベージュ	ブラック		
ハイソックス 	SS	JP-Q20K1S	JP-Q20K1B	1足(2本)／箱 11,330円 (10,300円)	JP-Q21K1S	JP-Q21K1B	1足(2本)／箱 11,330円 (10,300円)
	S	JP-Q20K2S	JP-Q20K2B		JP-Q21K2S	JP-Q21K2B	
	M	JP-Q20K3S	JP-Q20K3B		JP-Q21K3S	JP-Q21K3B	
	L	JP-Q20K4S	JP-Q20K4B		JP-Q21K4S	JP-Q21K4B	
	2L	JP-Q20K5S	JP-Q20K5B		JP-Q21K5S	JP-Q21K5B	
	3L	JP-Q20K6S	JP-Q20K6B		JP-Q21K6S	JP-Q21K6B	
ストッキング シリコン グリップ付 ドット 	SS	JP-Q20T1S	JP-Q20T1B	1足(2本)／箱 15,950円 (14,500円)	JP-Q21T1S	JP-Q21T1B	1足(2本)／箱 15,950円 (14,500円)
	S	JP-Q20T2S	JP-Q20T2B		JP-Q21T2S	JP-Q21T2B	
	M	JP-Q20T3S	JP-Q20T3B		JP-Q21T3S	JP-Q21T3B	
	L	JP-Q20T4S	JP-Q20T4B		JP-Q21T4S	JP-Q21T4B	
	2L	JP-Q20T5S	JP-Q20T5B		JP-Q21T5S	JP-Q21T5B	
	3L	JP-Q20T6S	JP-Q20T6B		JP-Q21T6S	JP-Q21T6B	


一般的名称: 弾性ストッキング 販売名:ジョブスト オペーク 医療機器届出番号27B1X00006650905

ジョブスト オパーク2

31~43hPa(23~32mmHg) 数値は足首部の圧迫圧です。

カラー サイズ	つま先あり		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	つま先なし		[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)	
	ベージュ	ブラック		ベージュ	ブラック		
パンティ ストッキング 	SS	JP-Q20W1S	JP-Q20W1B	1足 /箱 26,400円 (24,000円)	JP-Q21W1S	JP-Q21W1B	1足 /箱 26,400円 (24,000円)
	S	JP-Q20W2S	JP-Q20W2B		JP-Q21W2S	JP-Q21W2B	
	M	JP-Q20W3S	JP-Q20W3B		JP-Q21W3S	JP-Q21W3B	
	L	JP-Q20W4S	JP-Q20W4B		JP-Q21W4S	JP-Q21W4B	
	2L	JP-Q20W5S	JP-Q20W5B		JP-Q21W5S	JP-Q21W5B	
	3L	JP-Q20W6S	JP-Q20W6B		JP-Q21W6S	JP-Q21W6B	

採寸表

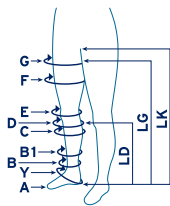

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)									
	つま先 (A)	足関節 (Y)	足首 (B)	ふくらはぎ下部 (B1)	ふくらはぎ (C)	腓骨頭 (D)	膝蓋骨 (E)	大腿中央部 (F)	大腿部 (G)	大腿部シリコンバンド (G)
SS	17-22	26-31	18-20	23-27	28-34	27-33	30-37	39-52	43-57	43-48
S	19-24	28-33	20-22	24-29	30-37	29-36	33-40	41-56	45-62	45-52
M	21-26	29-35	22-24	26-32	33-40	32-39	35-43	44-60	49-67	49-56
L	23-29	31-37	24-26	29-35	35-43	34-42	37-45	47-65	53-72	53-60
2L	25-32	32-38	26-28	31-37	37-46	36-45	39-48	50-69	56-77	56-64
3L	27-34	33-40	28-30	33-39	39-49	38-48	41-51	53-73	60-81	60-68

<適用肢長> ハイソックス 膝下の長さ(LD):34-39 cm、ストッキング 脚の長さ(LG):60-69cm、
 パンティストッキング 股下の長さ(LK): 65-75cm

<採寸表について>

- ・サイズの選択は基本的にB(足首)ポイントを優先させてください。
- ・Bポイントの値が2サイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。
- ・G(大腿部)ポイントの測定は、ハイソックスをお選びの方は不要です。



ジョブスト ライトウェア™

柔らかく自然な履き心地の
着圧ソックス

- ・膝下部の食い込みを防ぐため、バンドを太くゆったり編みました。
- ・吸水性が高く、快適な履き心地です。

段階的圧力設計

足首(最大)
20hPa
(15mmHg)



11~20hPa(8~15mmHg) 数値は足首部の圧迫圧です。

		カラー	ブラック	アイボリー	ホワイト
		サイズ			
 ハイソックス 男女兼用	S		JP-LWS10KSBR	JP-LWS10KSVR	JP-LWS10KSWR
	M		JP-LWS10KMBR	JP-LWS10KMVR	JP-LWS10KMWR
	L		JP-LWS10KLBR	JP-LWS10KLVR	JP-LWS10KLWR
[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)			1足(2本) 3,410円 (3,100円)		

ジョブスト ライトウェアは医療機器ではありません。

サイズ表

靴のサイズでお選びください。

S	21.5~23.5cm
M	24.0~26.0cm
L	26.5~28.0cm



ジョブスト ファロークイック

スリーブと4つのベルトで簡単着用

- ・スリーブと4つのベルトで、簡単に着用できます。
- ・別売りのハイブリッドライナーと組み合わせて使用することにより、足先からひざ下まで圧迫ができます。



ファロークイック
左右のベルト4つを引っ張りながら固定するだけ



ハイブリッドライナー (別売)
足先～足首のみの圧迫設計

ココだけ圧迫

ジョブスト ファロークイック

ジョブスト ハイブリッドライナー

数値は足首部の圧迫圧です。


40~53hPa
(30~40mmHg)

足先～足首間に
27~40hPa (20~30mmHg)の
圧迫圧がかかります。

サイズ	タイプ	レッグピース	標準	ワイド
XS		JP-FW4RK1	—	
S		JP-FW4RK2	JP-FLHK2	JP-FLHK2W
M		JP-FW4RK3	JP-FLHK3	JP-FLHK3W
L		JP-FW4RK4	JP-FLHK4	JP-FLHK4W
XL		—	JP-FLHK5	JP-FLHK5W
[包装単位]		1個	2本	
希望小売価格 (本体価格)		15,620円 (14,200円)	3,080円 (2,800円)	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブストファロークイック
医療機器届出番号:27B1X00006651307

採寸表

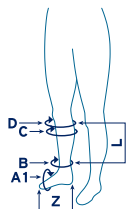

ジョブスト ファロークイック

(単位:cm)

サイズ	適用周囲長		適用股長
	足首 (B)	ふくらはぎ (C)	足首から膝下までの長さ (L)
XS	17-23	25-38	30-33
S	19-28	32-48	
M	25-37	37-56	
L	29-43	43-67	


ジョブスト ハイブリッドライナー

(単位:cm)

サイズ	ふくらはぎ周囲 (C)	足長 (Z)	足周径 (A1)	
			標準タイプ	ワイドタイプ
S	≤60	21-24	20-27	28-35
M		24-26		
L		26-28		
XL		28-31		

インジケーター付き2層バンデージキット ジョブスト コンプリ2

パディング包帯と
着性のショートストレッチバンデージを
キット化した
2層バンデージキット

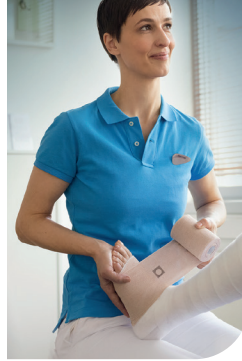


第1層

パディング包帯で、均一な圧迫と皮膚の保護に使用
包帯を滑りにくくするため、片面をポリウレタンコーティング



第2層

低伸縮の着性ショートストレッチバンデージで、圧迫するために使用
印刷された楕円形のインジケーターが真円になるように伸展させることで、常に同じ強さで巻くことができる

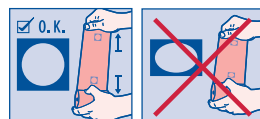

円になるように伸展

足首周径	ショートストレッチバンデージ*	パディング包帯*	コード番号	包装単位	希望小売価格 (本体価格)
18-25cm	10cm×5.5m	10cm×3.5m	JP-CW1055	1箱	3,960円 (3,600円)
25-32cm	10cm×7.5m	10cm×5.2m	JP-CW1075		5,060円 (4,600円)

ショートストレッチバンデージとパディング包帯が1ロールずつ箱に同梱されています。
*伸ばした状態での長さ



自着性低伸縮弾性包帯 コンプリハフト

運動時の高圧迫力と静止時の低圧迫力を可能にするショートストレッチ包帯。
包帯同士が互にくっつく自着性があり、ずれやゆるみがおきにくい。



低伸縮弾性包帯 コンプリラン

運動時の高圧迫力と静止時の低圧迫力を可能にするショートストレッチ包帯。

サイズ*	コード番号	包装単位	希望小売価格 (本体価格)
8cm×5m	JP-CH45958	1ロール/箱	2,310円 (2,100円)
10cm×5m	JP-CH45959		2,640円 (2,400円)

*伸ばした状態での長さ

サイズ*	コード番号	包装単位	希望小売価格 (本体価格)
6cm×5m	JP-CR01026	1ロール/箱	1,210円 (1,100円)
8cm×5m	JP-CR01027		1,650円 (1,500円)
10cm×5m	JP-CR01028		1,980円 (1,800円)
12cm×5m	JP-CR01029		2,310円 (2,100円)

*伸ばした状態での長さ



筒状包帯
テンソグリップ™

軽度の伸縮性があるチューブ状の包帯なので、衣類のように履くだけで装着が可能。

サイズ*	コード番号	包装単位	希望小売価格 (本体価格)
7.5cm×10m	JC-TG0750	1本/箱	7,810円 (7,100円)
8.75cm×10m	JC-TG0875		8,140円 (7,400円)
10cm×10m	JC-TG1000		8,580円 (7,800円)
12cm×10m	JC-TG1200		11,660円 (10,600円)
17.5cm×10m	JC-TG1750		14,740円 (13,400円)

*伸ばした状態での長さ



筒状包帯
デルタ テリーネットS


サイズ*	コード番号	包装単位	希望小売価格 (本体価格)
5cm×13.5m	JC-TN050	1本/箱	9,020円 (8,200円)
7.5cm×13.5m	JC-TN075		11,660円 (10,600円)
10cm×13.5m	JC-TN100		15,950円 (14,500円)
12.5cm×13.5m	JC-TN125		19,360円 (17,600円)
15cm×13.5m	JC-TN150		23,320円 (21,200円)

*伸ばした状態での長さ

弾性ストッキング着用補助具

ジョブスト ストッキングドナー

履きやすい、履かせやすい、
弾性ストッキング着用補助具

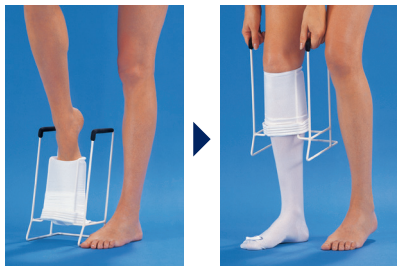



コード番号	[包装単位] 希望小売価格 (本体価格)
JP-SD110913	1台/箱 4,290円 (3,900円)

正しい履き方 - コツをつかむと、履きやすくなります -

はじめに

※履き方はストッキング・ソックス共通です。


- たぐらないでください。履きづらくなります。
- 必ず座って履いてください。
立ちながら履くと、転倒するおそれがあります。
- つま先なしタイプは、着用を補助する
フットスリップ付きです。

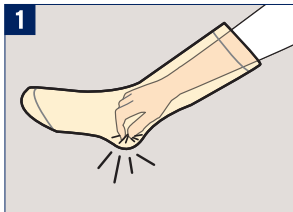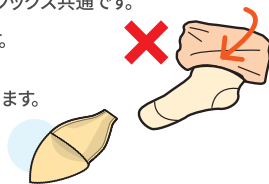


ストッキングの中に手を入れ、かかとの部分を内側から軽くつまむ。



ストッキングを丸めないように裏返していく。

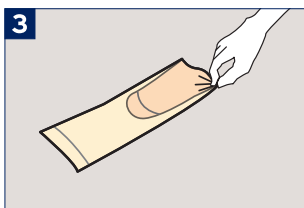

つまんだかかと部分まで裏返す。

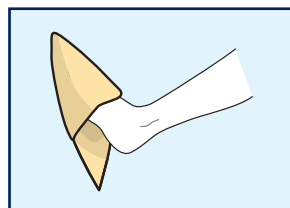

• つま先なしタイプのみ
フットスリップを履く。



つま先を奥に入れかかとまで履く。 かかとの少し上を持ち、足首まで履く。



ねじれ・たるみ・しわに注意しながら、少しずつたくし上げる。



最後に全体をなでて整える。



• つま先なしタイプのみ
つま先の空いている部分からフットスリップ