

弾性ストッキング

コンプリネット™ プロ

- ハイソックス レギュラー
- ハイソックス ショート
- ストッキング

足首部の圧迫力を最大に、
大腿部に向けて弱くなる段階的圧迫構造が、
血液循環の促進に役立ちます。*

血行状況を
確認することができるように、
足先に血行モニター用ホールが
ついています。



長期入院の方、手術を受けられる方などの
静脈血流の促進のために！

静脈血還流促進を目的とした適切な圧勾配*

特 徴

■段階的な圧迫

足首部が19-24hPa(14-22mmHg)で大腿に向かって徐々に弱くなっていく段階的圧迫構造です。

■ぴったりフィットで快適な履き心地

脚の形に合わせた立体構造です。フィット感がよく、ずれにくくなっています。


■ショートタイプの品揃え

より多くの患者さんへ対応するため、ハイソックスのS, Mサイズにショートタイプがあります。

■幅広く対応するためのサイズ設定

ふくらはぎ周径23～53cmまで幅広く適応します。周径の大きい方にはXLサイズをご用意しました。

■ラテックスフリー

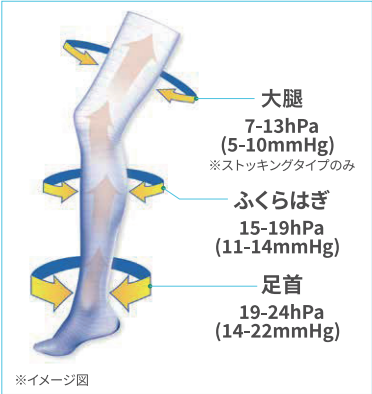

* 参考文献：岩井武尚 監修、孟真/佐久田齊 編集(2020) 新弾性ストッキング・コンダクター[第2版増補版] 株式会社へるす出版 P67

着用中のチェックポイント&注意点

腓骨頭の
1cm～1.5cm下に
上端が目安

シワやよじれは
ないですか？

伸ばしすぎて
いませんか？

上端を折り返したり
していませんか？
丸まってくいこんで
いませんか？

かかとがずれて
いませんか？

モニターホールから
足の指が
出ていませんか？

品 種 表

タイプ	サイズ	コード番号	共通商品コード(JAN)	モニターホール カラーコード(足先部)		包装単位	
ハイソックス レギュラー	S	JP-P77026SK	4987601593741		黄	1足 (2本)	Sサイズ
	M	JP-P77027MK	4987601593765		白		Mサイズ
	L	JP-P77028LK	4987601593789		青		Lサイズ
	XL	JP-P77029XLK	4987601593796		緑		XLサイズ
ハイソックス ショート	S	JP-P77026SK1	4987601593758		黄+緑		ハイソックス ショート▼
	M	JP-P77027MK1	4987601593772		白+緑		Sサイズ
ストッキング	S	JP-P46335SR	4987601593703		黄		Mサイズ
	M	JP-P46337MR	4987601593710		白		
	L	JP-P46388LR	4987601593727		青		
	XL	JP-P46390XLR	4987601593734		緑		

採寸表

	共 通	ハイソックス(レギュラーサイズ)	ハイソックス(ショートサイズ)	ストッキング	
サイズ	ふくらはぎ周囲長(C)	【参考】膝下の長さ(A2)	【参考】膝下の長さ(A2)	脚の長さ(A1)	
S	23-30	43cm以下	39cm以下	64-80	
M	30-38				
L	38-46				
XL	46-53				

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:コンプリネットプロ 医療機器届出番号:27B1X00006650101

(01)14987601593700

電子添文検索用GS1コード

ご使用に際しては、電子添文をご確認の上、正しくご使用ください。